

スタンダード RNA for nCoV[Ready-to-use] 使用方法

この度は当社の陽性コントロール試薬(スタンダード RNA for nCoV[Ready-to-use])をご購入いただき、誠にありがとうございます。

当社の新型コロナウイルス検出試薬キットの精度管理を目的としてスタンダード RNA for nCoV[Ready-to-use]をご使用される場合は、下記方法に従って調製・分析してください。

使用方法 (AutoAmp 使用時)

1. 本製品を完全に解凍させた後、しっかり混合します。
2. スポイトを使用して、ポリプロピレン製試験管へ全量 (400 μ L) を分注します。
3. 241-19800 AutoAmp 取扱説明書に従って分析してください。

使用方法 (汎用 PCR 装置使用時)

1. 本製品を完全に解凍させた後、しっかり混合します。
2. 検体の代わりに 5 μ L 添加してください。
注意：本品は希釈せず、そのままご使用ください。
3. Ampdirect 2019-nCoV 検出キットの添付文書または 2019 新型コロナウイルス検出試薬キットの取扱説明書に従ってサンプルを調製してください。

使用上の注意

- 残った試薬は密栓して廃棄してください。
注意：本品は 1 回使い切りです。劣化の恐れがあるため、再凍結しないでください。
- スタンダード RNA for nCoV はスタンダード RNA for nCoV[Ready-to-use]の高濃度タイプであるため、使用方法が異なります。ラベル、製品番号(P/N)をご確認の上でご使用ください。

